

KIT PER RIFINITURA DISILICATO DI LITIO E ZIRCONIA



Kit di strumenti rotanti realizzato per la rifinitura e lucidatura del disilicato di litio
Composto da strumenti in diamante sinterizzato o multistrato e in carburo di silicio
IMPORTANTE: durante la rifinitura e' consigliato utilizzare un basso numero di giri e
Bagnare il manufatto con acqua per evitare surriscaldamento del materiale.
Non superare il numero di giri specificato nel dettaglio che segue.

Dettaglio di utilizzo dei vari strumenti da sinistra a destra partendo dall'alto:

- ISO 613.900.327.504.200 D20X0,2KER **DISCO RINFORZATO IN FIBRA DI KEVLAR** PER IL TAGLIO DI SPINE DI FUSIONE RPM MAX. 15.000.
- ISO 655.104.372.512.160 **ABRASIVO VERDE IN CARBURO E SILICIO** PER ABBASSARE I PERNI DI FUSIONE DOPO IL TAGLIO E SGROSSO DELLA STRUTTURA RPM MAX.15.000
- ISO 658.900.372.522.220 **GOMMINO A RUOTA BIANCO** A LUNGA DURATA PER PRELUCIDATURA DI BORDI E PARTI ESTERNE RPM MAX. 15.000.
- ISO803.104.372.517.110 **GOMMINO A RUOTA BIANCO/GIALLO DIAMANTATO** PER BRILLANTATURA DI BORDI E PARTI ESTERNE RPM MAX 15.000
- 855.104.197.524.040 – **ABRASIVO IN DIAM. SINTERIZZATO VERDE CONICO** PER RIFINITURA PARTI ESTERNE E BORDI RPM MAX 12.000
- 2 FORME DI **FRESE DIAMANTATE MULTISTRATO** PER PICCOLE RIFINITURE INTERNE ED ESTERNE DOPO LA PRESSATURA FORNITE CON RIDUTTORE HP-FG RPM MAX 100.000.

TUTTI GLI STRUMENTI CONTENUTI IN QUESTO KIT SONO DI PRODUZIONE TEDESCA E SVIZZERA.
GLI STRUMENTI ROTANTI CONTENUTI IN QUESTO KIT SONO STATI A LUNGO USATI E TESTATI DA MOLTI ODONTOTECNICI NOSTRI CLIENTI.

QUESTO KIT VIENE OFFERTO CON FORMULA SODDISFATTI O RIMBORSATI (se il cliente non fosse soddisfatto dell'efficacia del kit , esso potrà essere reso entro 7 gg lavorativi e poi rimborsato).

PREZZO OFFERTA € 49,18+ IVA (€60,00)